



## INSTRUCCIONES PARA TOMARSE UNA MUESTRA VAGINAL

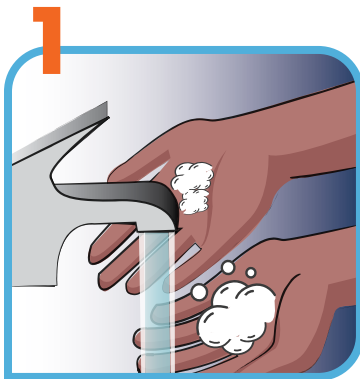

Lávese muy bien las manos con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos.




Quítese la ropa de la cintura para abajo. Quítese el tampón, si tiene puesto uno. Póngase en una posición en la que pueda insertar cómodamente el hisopo dentro de la vagina, como sentarse en el inodoro, pararse con un pie en una silla o cualquier posición que usaría para insertar un tampón.

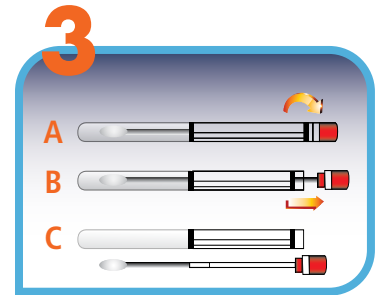

Abra el hisopo. **NO TOQUE LA PUNTA DEL HISOPO.**  
**A.** Primero gírelo para romper el sello.  
**B.** Después jale. El hisopo permanecerá unido a la tapa.  
**C. NO TIRE** el tubo de plástico! Usted necesitará colocar su hisopo en ese tubo después de tomar la muestra.




Sostenga firmemente el hisopo a una distancia de 1 a 2 pulgadas de la punta suave.

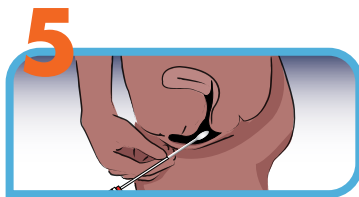

Inserte la punta blanca del hisopo de 1 a 2 pulgadas dentro de su vagina y gírelo durante 15 a 30 segundos. Asegúrese de que el hisopo toque las paredes de su vagina.



Retire el hisopo de su vagina. No deje que la punta del hisopo toque nada. Está bien si hay sangre u otro tipo de flujo en el hisopo.

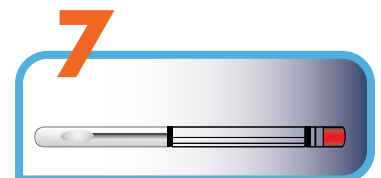


Coloque el hisopo usado dentro del tubo. Cierre muy bien el tubo para evitar fugas.




Coloque el tubo cerrado dentro de la bolsa de color rojo para las muestras. Selle la bolsa. (Si está devolviendo múltiples hisopos, todos deberán colocarse dentro de la misma bolsa para muestras).



Lávese muy bien las manos con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos.

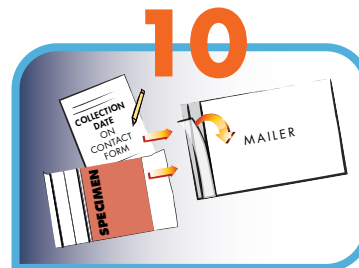

Coloque la bolsa sellada dentro del paquete que devolverá (sobre blanco con etiqueta adhesiva azul en forma de diamante en el frente). Escriba la fecha de recolección en el formulario de contacto y colóquelo también dentro del paquete que devolverá. Selle el sobre.

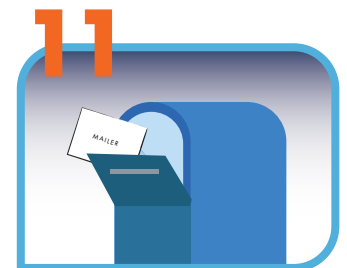

Deje el sobre de retorno en cualquier buzón de USPS (Servicio Postal de EE. UU.)